

CREATION moor

MEDIZINPRODUKT
MADE IN GERMANY

Wärmekissen



Gebrauchsanweisung



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Natur-Moorkissen aus dem Hause Creation Direkt entschieden haben! Bei dem Produkt handelt es sich um ein patentiertes Medizinprodukt. Es bietet Ihnen sanfte Heilung und Entspannung mit natürlichen Inhaltsstoffen. Das CREATION Moorkissen setzt über mehrere Stunden therapeutische Wärme frei. Die Moorfüllung ist ein modifiziertes Naturprodukt, Farbschwankungen und Verfärbungen sind natürlich bedingt.

Der Torf wird aus regenerativem Abbau in Deutschland gewonnen. Die eingesetzte Folie ist frei von kritischen Weichmachern.

Anwendung in der Wärmetherapie - ideal bei Verspannungen: Bei einer Temperatur von 40 - 43° C entspannen sich die Muskeln und die

Regenerationsfähigkeit des Körpers wird gesteigert. Die erreichte Durchblutung regt den Stoffwechsel an, fördert den natürlichen Heilungsprozess und steigert das Wohlbefinden.

Lang andauernde Wärme lindert Schmerzen!

alle Moorkissen sind auf einer Seite mit einer hochwertigen Velourauflage versehen 	CREATION Moor-Wärmekissen  Extra groß (ca. 22,5 x 18 cm)	CREATION Moor-Nackenkissen  Ergonomisch für Schulter und Nacken (ca. 30,5 x 40 cm)	CREATION Moor-Rückenkissen  Universal (ca. 29,5 x 34 cm)
Mikrowelle (bei max. 600 Watt) Alle zwei Minuten stoppen und Kissen durchkneten	Ca. 2-3 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 10-Sekunden Schritten verlängern	Ca. 2-3 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 10-Sekunden Schritten verlängern	Ca. 3-4 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 10-Sekunden Schritten verlängern
Backofen Auf einen Teller legen (bei max. 120° C) Nicht vorwärmen	Ca. 10 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 2-Minuten-Schritten verlängern	Ca. 10 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 2-Minuten-Schritten verlängern	Ca. 15-20 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 2-Minuten-Schritten verlängern

Anwendungsgebiete: Hexenschuss, Muskelkater, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Menstruationsbeschwerden, Rheumatische Beschwerden, Gelenksteife, Nackensteife, Nackenbeschwerden, Magenschmerzen, Verspannungen



Anwendung in der Kältetherapie - ideal bei Entzündungen

Kälte dämpft Entzündungen, da die verringerte Körpertemperatur die Aktivität der Entzündungsmediatoren hemmt. Zunächst werden bei der Kältetherapie Gefäßreaktionen ausgelöst und die Muskeln spannen sich an. Das Schmerzempfinden reduziert sich. Bei längerer Anwendung verringert sich die Muskelaktivität, die Muskelspannung wird gesenkt und Verkrampfungen lockern sich.

Anwendungsgebiete: Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen, Kopfschmerzen, Migräne, Fieber, Rheumatische Beschwerden, Blutergüsse, Nächtliche Wadenkrämpfe, Ödeme, Tennisarm, Entzündungen an Muskeln und Gelenken, Müde, schwere Beine



Wichtige Hinweise

Vor der Anwendung bitte die Temperatur vorsichtig mit dem Handrücken testen. Um mögliche Hitze- oder Kältereaktionen auf der Haut zu vermeiden, legen Sie das Kissen nach der Aktivierung in ein Handtuch oder eine Schutzhülle. Bedenken Sie, dass bereits bei Temperaturen ab 48° C Verbrennungen auftreten können. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern! Es besteht u.a. Erstickungsgefahr. Das Moorkissen darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme oder Kälte nicht wahrnehmen kann.

Verwenden Sie diesen Artikel deswegen nicht bei Kindern unter 3 Jahren, bei hilflosen und hitzeunempfindlichen Personen. Nicht im Zusammenhang mit schmerzstillenden Mitteln verwenden. Kältetherapie nicht anwenden bei arteriellen Durchblutungsstörungen und Raynaud-Syndrom.

Durch spitze und scharfe Gegenstände oder Überhitzung, können Schäden an dem Moorkissen entstehen. Es darf dann nicht mehr angewendet werden! **Bitte überprüfen Sie das Kissen vor jeder Anwendung, nach dem Erwärmen, auf Schäden.** Sollte das Kissen undicht sein, bitte nicht mehr verwenden, da andere Gegenstände verschmutzt werden.

Für etwaige Folgeschäden kann keine Garantie übernommen werden. Die Gebrauchsanleitung ist sorgfältig aufzubewahren. Das Moorkissen bitte nach der Benutzung mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken lagern. Bei längerer Verwendungspause das Moorkissen regelmäßig erwärmen um einer Austrocknung entgegenzuwirken.



Bitte beachten Sie diese Hinweise

Das hochwertige CREATION Natur-Moorkissen wird Ihnen lange Zeit ein angenehmer Helfer sein.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker

Hergestellt für Creation Direkt international GmbH, Birkenfeld
Hersteller: blue bell cosmetic GmbH, Wöhrmannstraße 15,
D-47546 Kalkar-Kehrum

